

NOVO CONCEITO DE DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL À BASE DE **GLUTARALDEÍDO.**



**Pronto
para uso**

Não Precisa de
Ativação

Esporicida

Elimina *Clostridium
sporogenes* e
Bacillus subtilis



Segurança e eficácia na desinfecção de **alto nível**


- ✓ Menor **Odor***
- ✓ Ação **Sinérgica**
- ✓ Ação bactericida em **5 minutos****
- ✓ **Compatível** com diversos materiais
- ✓ Fácil utilização - solução **pronto uso**
- ✓ Atende a **RDC 700/2022**

É indicado para a desinfecção de endoscópios flexíveis, materiais termossensíveis.


LABSTERIL GTA é um desinfetante de alto nível, pronto uso, eficaz e com propriedades microbiológicas comprovadas por laudos BPL (Boas Práticas de Laboratório) - ANVISA.

LABSTERIL GTA é um desinfetante de alto nível à base de Glutaraldeído, estabilizado, pronto para uso.

Modo de usar

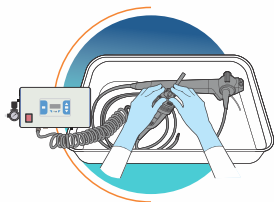


1 - Limpar o aparelho antes da desinfecção utilizando detergentes enzimáticos **LABNEWS**. Em seguida, enxágue bem. Para limpeza de endoscópios, o sistema multifuncional Endojet é um produto de apoio na limpeza de lumens.

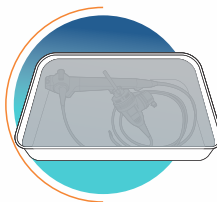

2 - Seguir recomendação do rótulo do **LABSTERIL GTA** e em um recipiente coloque o material limpo e seco de modo que fique totalmente submerso no produto. Aguardar o tempo de ação para a desinfecção de alto nível (10 minutos).



3 - Após o tempo de contato para a desinfecção, retirar o endoscópio e enxaguar com água purificada de modo que se garanta a remoção do **LABSTERIL GTA** das partes externas e canais. O enxágue criterioso é parte importante do processamento dos materiais.

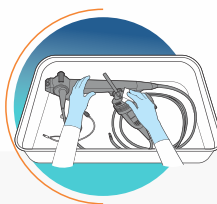

4 - Secar o endoscópio com pano de uso único, com cuidado para manter a integridade do material e do processo de desinfecção, cuidando para o armazenamento seguro.

Importante

Verificar a presença do Ativo Glutaraldeído 2% antes de utilizar o produto, através da leitura da fita **LABTEST GTA**. Comparar na escala do frasco a cor APROVADO.

A validade da solução é de 30 dias.

Seguir recomendação do rótulo do **LABSTERIL GTA** para o descarte correto do produto.



O LABSTERIL GTA possui amplo espectro de ação microbiológica:

- | | | |
|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| ✓ Staphylococcus aureus | ✓ Tricophyton mentagrophytes | ✓ Mycobacterium massiliense |
| ✓ Pseudomonas aeruginosa | ✓ Candida albicans | ✓ Mycobacterium bovis |
| ✓ Escherichia coli | ✓ Clostridium sporogenes | ✓ Mycobacterium smegmatis |
| ✓ Salmonella choleraesuis | ✓ Bacillus subtilis | ✓ Mycobacterium avium |

Possui laudos de segurança e compatibilidade para diversos materiais.

A **Labnews** possui Certificação BPF (Boas Práticas de Fabricação) ANVISA e oferece produtos, equipamentos e acessórios visando promover soluções para o processamento de materiais médicos.

Temos uma linha completa de detergentes enzimáticos, removedores de oxidações, lubrificantes, escovas especiais, Lavadoras Ultrassônicas/Sistema Endojet para auxiliar nos processos de limpeza e conservação dos materiais.



*Tem na sua formulação propileno glicol que é um componente que diminui o ponto de evaporação da solução desinfetante, minimizando o odor no ambiente.

**Para os microrganismos Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella entérica, Pseudomonas aeruginosa.